

Module de chambre
avec lampe de
signalisation et
identification de lit
2921 ..

GIRA

Système d'appel 834

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Systèmes d'installation
électrique
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Boîte postale 12 20
42461 Radevormwald
Allemagne
Tél. +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-399
www.gira.de
info@gira.de

410936100 / 15.06.2009

Consignes de sécurité

En cas de non-respect des indications de ce manuel, il y a danger de détérioration de l'appareil, d'incendie ou d'autres dangers.

Ce manuel fait partie du produit et doit rester chez les utilisateurs.

Etendue de la livraison

Module de chambre avec lampe de signalisation et identification de lit (référence 2921 ..) pour montage dans une boîte d'encastrement.

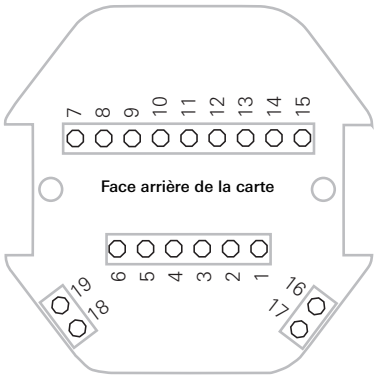
Veillez tenir compte des indications d'installation détaillées du mode d'emploi d'ensemble, disponible sous:
www.download.gira.de

Garantie

Nous accordons une garantie dans le cadre des stipulations légales.

Veillez envoyer l'appareil franco de port avec une description du défaut via le commerce spécialisé à notre service après-vente central:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
Allemagne

Vue de l'appareil	Affectation des broches
 <p>Face arrière de la carte</p>	<p>Alimentation</p> <p>3 GND Masse 4 GND Masse 5 + 24 V Tension d'alimentation 6 + 24 V Tension d'alimentation</p> <p>Bus de groupe</p> <p>1 GBUS- Ligne de données (-entrée) 2 GBUS+ Ligne de données (+sortie)</p> <p>Zone WC</p> <p>15 + 24 V_out Tension (sécurisée) 11 RTWC Touche d'appel WC 12 RLWC_2 Lampe d'appel WC avec lumière d'orientation 13 ATWC Touche d'arrêt de l'appel WC</p> <p>Chambre</p> <p>15 + 24 V_out Tension (sécurisée) 14 SU Bruiteur (sortie) 9 AT1 Touche de présence 10 AL LED dans la touche de présence 7 RT Touche d'appel (entrée) 8 RL LED dans la touche d'appel (sortie) 16 IN_2 Déclenchement d'appel lit 2 (entrée) 17 OUT_2 LED dans la touche d'appel lit 2 (sortie) 18 IN_1 Déclenchement d'appel lit 1 (entrée) 19 OUT_1 LED dans la touche d'appel lit 1 (sortie)</p>
<p>Raccordement à: Raccordement de:</p>	<p>Bus de groupe</p> <p>Bouton-poussoir d'appel, bouton-poussoir d'appel avec contact à fiche de connexion secondaire, bouton-poussoir à tirette et bouton-poussoir d'appel pneumatique, bouton-poussoir de présence, bouton-poussoir d'arrêt, appel WC.</p>
<p>Indication:</p>	<p>Fermer JP 1 pour le dernier participant au bus.</p>
<p>Informations complémentaires:</p>	<p>Câblage des composants de déclenchement d'appel, voir mode d'emploi d'ensemble. Câblage des composants de désactivation d'appel, voir mode d'emploi d'ensemble. Câblage dans la chambre, voir mode d'emploi d'ensemble. Câblage dans la zone de WC (salle d'eau), voir mode d'emploi d'ensemble. Câblage des participants au bus de groupe, voir mode d'emploi d'ensemble. Description de la fonction de retransmission d'appel, voir mode d'emploi d'ensemble.</p>